


KLINISCHE HANDLEIDING BIJ OPSTELLING

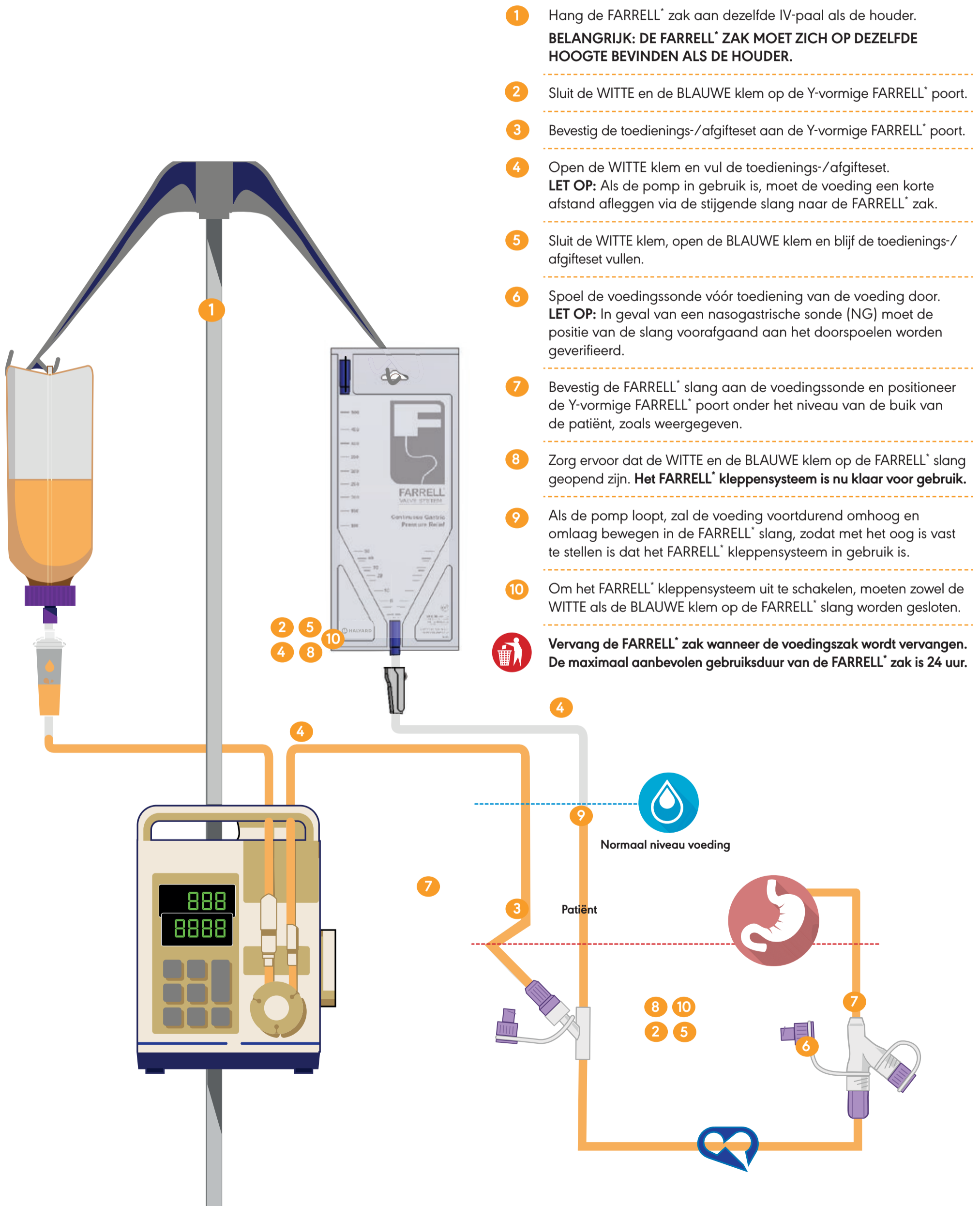

- 1 Hang de FARRELL* zak aan dezelfde IV-paal als de houder.
BELANGRIJK: DE FARRELL* ZAK MOET ZICH OP DEZELFDE HOOGTE BEVINDEN ALS DE HOUDER.
 - 2 Sluit de WITTE en de BLAUWE klem op de Y-vormige FARRELL* poort.
 - 3 Bevestig de toedienings-/afgifteset aan de Y-vormige FARRELL* poort.
 - 4 Open de WITTE klem en vul de toedienings-/afgifteset.
LET OP: Als de pomp in gebruik is, moet de voeding een korte afstand afleggen via de stijgende slang naar de FARRELL* zak.
 - 5 Sluit de WITTE klem, open de BLAUWE klem en blijf de toedienings-/afgifteset vullen.
 - 6 Spoel de voedingssonde vóór toediening van de voeding door.
LET OP: In geval van een nasogastrische sonde (NG) moet de positie van de slang voorafgaand aan het doorspoelen worden geverifieerd.
 - 7 Bevestig de FARRELL* slang aan de voedingssonde en positioneer de Y-vormige FARRELL* poort onder het niveau van de buik van de patiënt, zoals weergegeven.
 - 8 Zorg ervoor dat de WITTE en de BLAUWE klem op de FARRELL* slang geopend zijn. **Het FARRELL* kleppensysteem is nu klaar voor gebruik.**
 - 9 Als de pomp loopt, zal de voeding voortdurend omhoog en omlaag bewegen in de FARRELL* slang, zodat met het oog is vast te stellen is dat het FARRELL* kleppensysteem in gebruik is.
 - 10 Om het FARRELL* kleppensysteem uit te schakelen, moeten zowel de WITTE als de BLAUWE klem op de FARRELL* slang worden gesloten.
-  **Vervang de FARRELL* zak wanneer de voedingszak wordt vervangen. De maximaal aanbevolen gebruiksduur van de FARRELL* zak is 24 uur.**

Het FARRELL* kleppensysteem

met equilibriumtechnologie

TOP TIPS

1. Om het FARRELL* kleppensysteem goed te laten functioneren, moet de Y-vormige FARRELL* poort zich BIJ of ONDER de buik van de patiënt bevinden.
2. Gebruik bij patiënten met een opgezette buik een spuit voor handmatige decompressie van de buik voordat u het FARRELL* kleppensysteem voor de eerste keer gebruikt.
3. Voordat de WITTE klem boven de Y-vormige poort wordt geopend, kan het bij patiënten die heel weinig voeding krijgen (pasgeborenen) aanzienlijk langer duren (60 tot 90 minuten) voordat de doorstroom op gang komt.
4. Als het FARRELL* kleppensysteem goed functioneert, kan de sondevoeding voortdurend omhoog en omlaag stromen in de FARRELL* slang.
5. Het FARRELL* kleppensysteem ontluicht de buik van de patiënt voortdurend, maar de FARRELL* zak zal zich doorgaans niet vullen met gas doordat deze een luchtgat bevat.
6. Gebruik voor het toedienen van medicatie indien mogelijk de toegangspoort op de voedingssonde. Sluit de BLAUWE klem voordat u de toegangspoort van de voedingssonde opent. Dien de medicatie toe en wacht 5 tot 10 minuten voordat u de BLAUWE klem weer opent.
7. Als de sondevoeding zich begint op te hopen in de FARRELL* zak en vermoed wordt dat de voedingssonde verstopt is geraakt, sluit dan de BLAUWE klem en ontkoppel het FARRELL* kleppensysteem. Controleer de voedingssonde op occlusie. Zodra de occlusie is opgelost, sluit u het FARRELL* kleppensysteem opnieuw aan.

BELANGRIJK: Als er een grote hoeveelheid sondevoeding in de FARRELL* slang en zak zit na het oplossen van een occlusie, stel de kophoogte van de FARRELL* zak dan bij om te voorkomen dat er in een keer een grote hoeveelheid voeding aan de patiënt wordt toegediend.

PAS OP: Als het FARRELL* kleppensysteem in gebruik is, wordt de vloeistofstroom naar de patiënt voornamelijk geregeld door de zwaartekracht. Bij normaal gebruik (met een ander systeem dan FARRELL*), kan de pompdruk (12-18 psi) occlusies en knikken in de voedingssonde ondervangen en oplossen. Als het FARRELL* kleppensysteem in gebruik is, worden deze occlusies mogelijk niet opgelost en zal de sondevoeding zich ophopen in de FARRELL* zak. Als dit gebeurt, sluit dan de WITTE rolklem die zich op de slang boven de Y-vormige FARRELL* poort bevindt, en wacht enkele minuten om te bepalen of de pomp de occlusie kan oplossen. Zorg ervoor dat de WITTE rolklem boven de Y-vormige FARRELL* poort is GESLOTEN en dat de BLAUWE klem onder de Y-vormige FARRELL* poort is GEOPEND.

Neem voor meer informatie contact op met
het Customer Service Team van Avanos:

Tel: 0800 023 10 79 (gratis uit NL)

Fax: 0800 023 10 78 (gratis uit NL)

Tel: 0800 78 775 (gratis uit BE)

Fax: 0800 78 774 (gratis uit BE)

customerservice.bnl@avanos.com

www.avanos.nl

AVANOS